

Inclui as seguintes partes principais:



Aplicador com sensor embutido



Transmissor



App AiDEX™

Antes de inserir o sensor, configurar o seu Smart MedLevensohn seguindo as instruções dos capítulos 3.1 a 3.3. do Manual do Usuário.

Passo 1: Inserir o Sensor

Selecione o Local do Sensor

01 Procure um local no abdome ou na parte de trás do braço onde haja preenchimento suficiente.

Notas: Evite locais com cicatrizes, verrugas, marcas de arranhão, inchaços e locais de injeções de insulina. Para prevenir irritação da pele, alternar os locais de aplicação.

02 Lave e seque as mãos. Limpe o local de aplicação do sensor com algodão embebido em álcool, e deixe secar.

Use o Aplicador Para Inserir o Sensor Embutido

03 Verifique se o lacre não foi violado antes de abrir. Abra o lacre de proteção do aplicador. Gire no sentido anti-horário para retirar o aplicador que contém o sensor para soltá-lo e em seguida remova-o da caixa.

04 Posicione o aplicador sobre o local selecionado. Empurre para baixo com firmeza e pressione o botão L para inserir o sensor.

05 Puxe suavemente o aplicador para longe do seu corpo. Certifique-se de que o sensor esteja seguro.


06 Após 14 dias de uso do sensor, descarte em acordo com as regulamentações locais o aplicador e o sensor que foram utilizados.




01





02

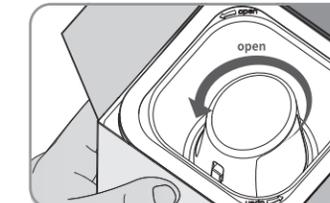


03

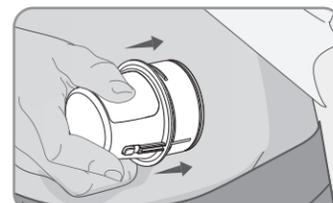


04

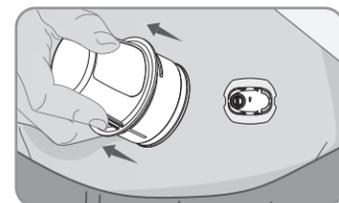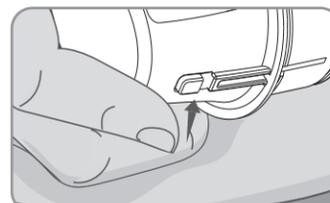


05

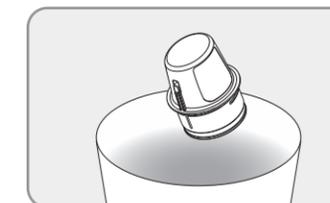


06

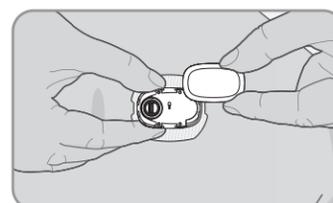

07

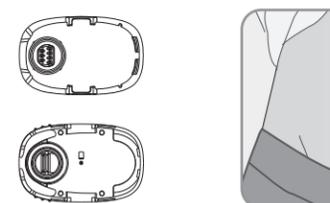

08

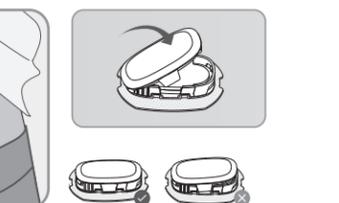

Pode ser aplicado um adesivo por cima.

Passo 2: Conecte o Transmissor

07 Encaixe o transmissor no suporte do sensor. Combine a orientação conforme a figura mostrada.

08 Certifique-se de que o fecho do gancho esteja encaixado antes de pressionar o outro lado. Você ouvirá um clique se o gancho estiver encaixado.

Passo 3: Iniciar um novo Sensor com App AiDEX™

09 Configure o app AiDEX™.

10 Faça o download e abra o app AiDEX™.

11 Inscreva uma nova conta, ou faça login no app (com sua conta existente AiDEX™). Siga o assistente de configuração na tela. Insira o número de série (SN), seu app AiDEX™ irá procurar pelo transmissor e irá parear com ele.

12 Após 1 hora, você receberá os resultados das leituras de glicose e alertas.

Para uso com App AiDEX




09

10



Número de série (SN) da caixa transmissora.

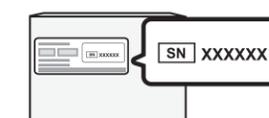

11



12

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Inclui as seguintes partes principais:



Aplicador com sensor embutido



Transmissor



App AiDEX™

Antes de inserir o sensor, configurar o seu Smart MedLevensohn seguindo as instruções dos capítulos 3.1 a 3.3. do Manual do Usuário.

Passo 1: Inserir o Sensor

Selecione o Local do Sensor

01 Procure um local no abdome ou na parte de trás do braço onde haja preenchimento suficiente.

Notas: Evite locais com cicatrizes, verrugas, marcas de arranhão, inchaços e locais de injeções de insulina. Para prevenir irritação da pele, alternar os locais de aplicação.

02 Lave e seque as mãos. Limpe o local de aplicação do sensor com algodão embebido em álcool, e deixe secar.

Use o Aplicador Para Inserir o Sensor Embutido

03 Verifique se o lacre não foi violado antes de abrir. Abra o lacre de proteção do aplicador. Gire no sentido anti-horário para retirar o aplicador que contém o sensor para soltá-lo e em seguida remova-o da caixa.

04 Posicione o aplicador sobre o local selecionado. Empurre para baixo com firmeza e pressione o botão L para inserir o sensor.

05 Puxe suavemente o aplicador para longe do seu corpo. Certifique-se de que o sensor esteja seguro.

06 Após 14 dias de uso do sensor, descarte em acordo com as regulamentações locais o aplicador e o sensor que foram utilizados.

Passo 2: Conecte o Transmissor

07 Encaixe o transmissor no suporte do sensor. Combine a orientação conforme a figura mostrada.

08 Certifique-se de que o fecho do gancho esteja encaixado antes de pressionar o outro lado. Você ouvirá um clique se o gancho estiver encaixado.

Passo 3: Iniciar um novo Sensor com App AiDEX™

09 Configure o app AiDEX™.

10 Faça o download e abra o app AiDEX™.

11 Inscreva uma nova conta, ou faça login no app (com sua conta existente AiDEX™). Siga o assistente de configuração na tela. Insira o número de série (SN), seu app AiDEX™ irá procurar pelo transmissor e irá parear com ele.

12 Após 1 hora, você receberá os resultados das leituras de glicose e alertas.


Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados




01





02

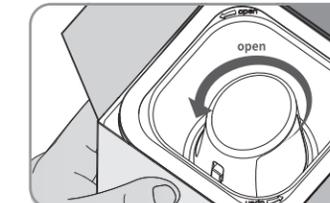


03

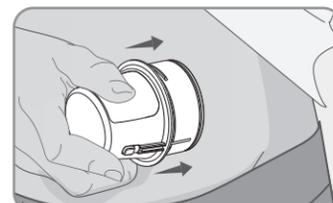


04

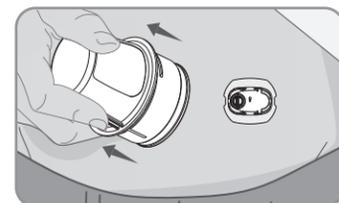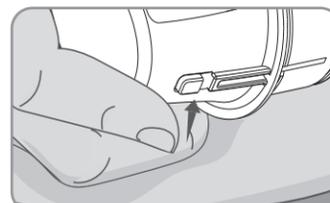


05

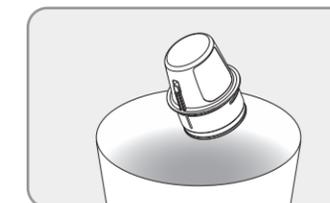


06

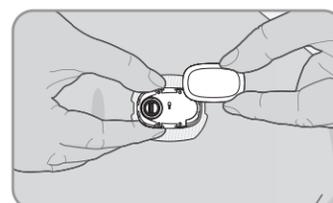

07

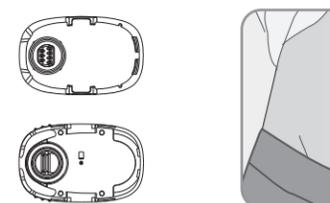

08

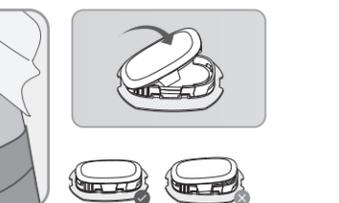

Pode ser aplicado um adesivo por cima.

Para uso com App AiDEX




09

10



Número de série (SN) da caixa transmissora.

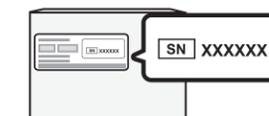

11



12